

TeleDot®

Electrodos

302C


Con soporte de foam e hidrogel adhesivo.
Posee sensor Ag/AgCl.

Sensor Ag/AgC

Reduce el ruido por impacto y posee excelente conectividad. Bajo contenido de Cl.

Espuma Adhesiva Microporosa

De polietileno. Confortable y suave a la piel. Su diseño es respirable, fácil de colocar y cómodo.

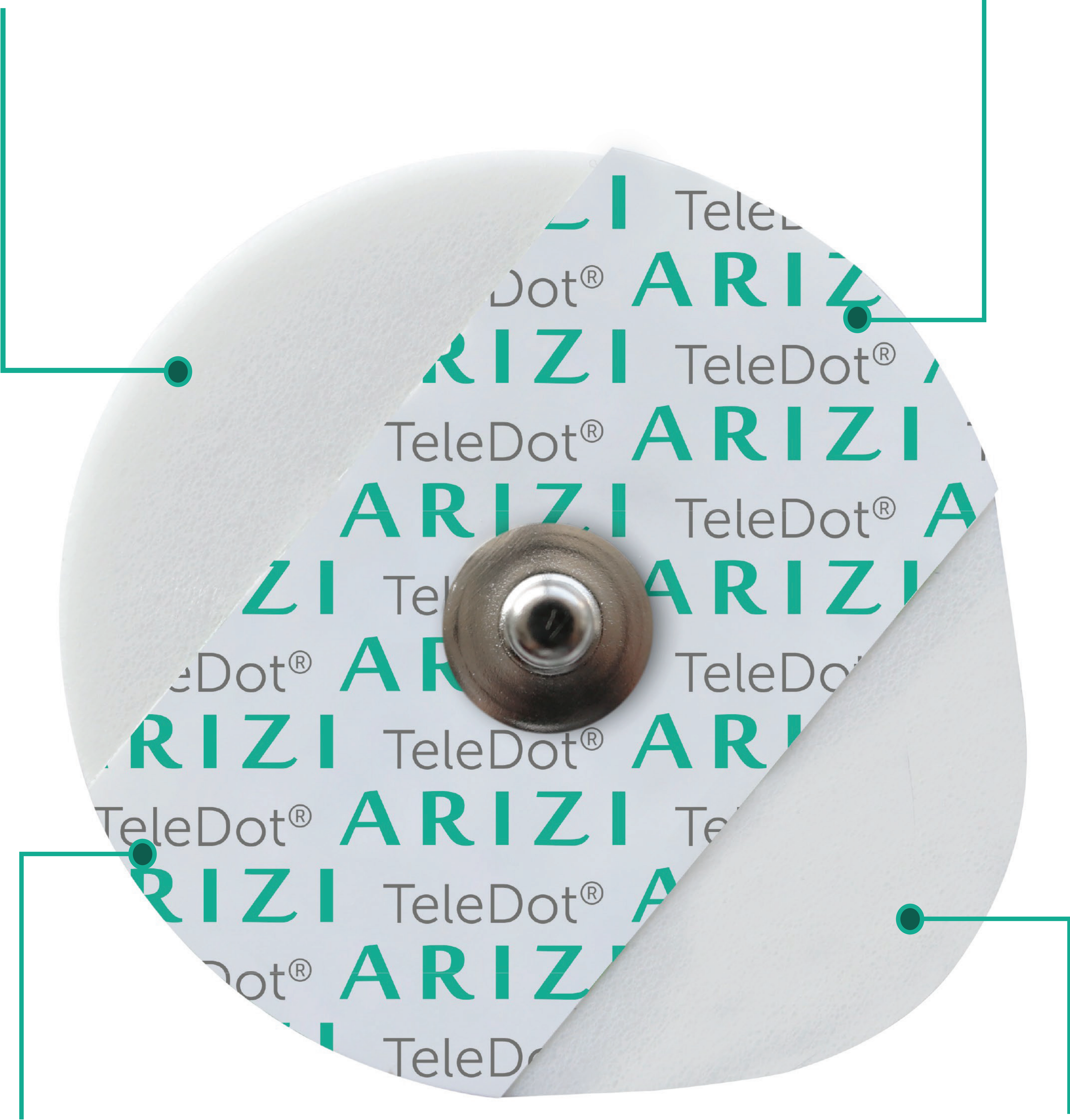

Alto Rendimiento y Resistencia

Uso de hasta cinco (5) días continuos. Apropiado para los entornos de monitoreo más desafiantes y pruebas de esfuerzo.

Monitoreo consistente (ECG)

El hidrogel garantiza excelente conductividad y calidad de trazas. No genera residuos y es hipoalergénico.

Medida	Código	Presentación
43x45 mm (Adulto)	AZ100201	Paquete x 50 Unds. Bulto x 8.000 Unds (160 Paquetes).
32x38 mm (Pediátrico)	AZ100202	

ARIZI

TeleDot®

Electrodos

302C

Con soporte de foam e hidrogel adhesivo.
Posee sensor Ag/AgCl.

Los electrodos para ECG (electrocardiografía) se utilizan para la captura de la señal eléctrica del corazón, registrada en un monitor ECG que luego es evaluada por personal médico calificado.

Los electrodos son dispositivos autoadhesivos, pre-gelificados de un solo uso que se aplican en la piel del pecho del paciente y tienen que ser conectados al monitor ECG a través de un cable de conexión.

El cloruro de plata (Ag/AgCl) ofrece la mejor sensibilidad. La adhesividad de la espuma es lo suficientemente fuerte para usar en pruebas de esfuerzo. No genera residuos, es hipoalergénico.

- Componentes y Material

 - ✓ La materia prima de la almohadilla es una espuma de polietileno, paño, cinta clara y microporos. Se adhiere adecuadamente en la piel debido a la gran flexibilidad.
 - ✓ Diseñado para monitoreo ECG donde se requiera confort, respirabilidad y una buena base permeable.
- Sensor y Conector

 - ✓ Elaborado con Ag / AgCl. Por lo tanto, reduce el ruido por impacto y tiene excelente conductividad. Puede transmitir la señal eléctrica en la superficie del cuerpo.
 - ✓ El conector garantiza una excelente conductividad, compuesto en carbono y acero inoxidable.
- Desempeño

 - ✓ Monitoreo consistente. El hidrogel garantiza excelente conductividad y calidad de trazas. El gel se esparce por la piel, lo que permite marcas ininterrumpidas, rápidas y de alta calidad. No genera residuos y es hipoalergénico.
- Certificación

 - ✓ Cumple y excede requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 13485:2016 y MDD 93/42/CEE.

Medida	Código	Presentación
43x45 mm (Adulto)	AZ100201	Paquete x 50 Unds. Bulto x 8.000 Unds (160 Paquetes).
32x38 mm (Pediátrico)	AZ100202	



ARIZI